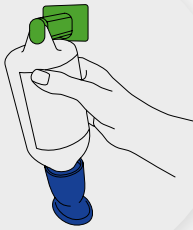


**Notruf  
112**

# Erste Hilfe für Ihre Augen

**1.**

Nehmen Sie die Flasche von der Halterung.

**2.**

Die Augenschale um 180° drehen bis der Widerstand nachgibt.

**3.**

**So funktioniert die Augenspülung:**

Kopf zurücklehnen oder Kopf nach vorn beugen und spülen.

## Bei Kontakt mit Säuren und Laugen

**1.**

Spülen Sie 2 Minuten mit BioPhos®74.


**2.**

Die Spülung mit der Natriumchloridlösung fortsetzen.

**3.**

Arzt konsultieren.

## Bei Kontakt mit Säuren und Laugen

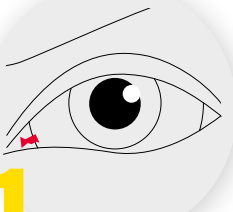**1.**

Sie haben Fremdkörper (z.B. Metall- oder Holzsplitter, Schmutz, Staub) im Auge.

**2.**

Das Auge mit Natriumchloridlösung spülen, bis Fremdkörper ausgespült sind.

**3.**

Arzt konsultieren.



### Hinweis:

Flasche leicht zusammendrücken und gleichmäßig spülen.

Keine abgelaufenen oder bereits geöffneten Spüllösungen verwenden.

Spülung bis zum Erreichen des Arztes fortführen.