

Witty-WT 8

Universal-Desinfektionsreiniger

Zuverlässig, schnell und vielseitig einsetzbar: Witty-WT 8 ist die universelle Lösung für eine effiziente Flächendesinfektion. Dank niedriger Einsatzkonzentrationen arbeiten Sie mit Witty-WT 8 besonders wirtschaftlich. Beim Verarbeiten ist das Wischdesinfektionsmittel reizarm und daher auch für die Sprühdeseinfektion geeignet.



-
- **Wirkt schnell in nur 5 Minuten**
 - **Verbesserte Rezeptur**
 - **Sparsam in der Anwendung**
-

Vorteile

1. Witty-WT 8 wirkt zuverlässig **bakterizid** (inkl. MRSA), **levurozid** und **virusinaktivierend** (Warzen- und Noroviren, HBV, HIV).
2. Der aldehydfreie Desinfektionsreiniger ist **besonders materialverträglich** und kann auf allen gängigen Oberflächen eingesetzt werden.
3. Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit einem **schnell wirkenden** Desinfektions-Reiniger: Bereits nach 5 Minuten können Sie Ihre Flächen wieder benutzen, wenn Sie eine 0,5%ige Gebrauchslösung verwenden.
4. Mit Witty-WT 8 arbeiten Sie **wirtschaftlich**, denn Sie erzielen bereits bei geringen Konzentrationen eine erstklassige Desinfektionswirkung.
5. Witty-WT 8 wird in wiederbefüllbaren Mehrweg-Gebinden geliefert. **Das vermeidet Verpackungsabfall** und spart gleichzeitig Lagerplatz.
6. Mit unserer **optimierten Rezeptur** erzielen wir eine **gesteigerte Wirksamkeit**, eine **verbesserte Reinigungswirkung** und **minimieren** gleichzeit mögliche **Reizungen**.

Die routinemäßige Desinfektion hat den Zweck, die Verbreitung von Krankheitserregern einzuschränken. Desinfizieren Sie alle Flächen, die mit erregershaltigem Material kontaminiert sein können, auch wenn dies nicht erkennbar oder sichtbar ist.

Damit Sie es leichter haben.

Witty

Anwendung

Stellen Sie mit Witty-Dosier Technik oder mit einem sauberen Messbecher eine Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration her.

Sprühdesinfektion: Desinfektionslösung gleichmäßig auf die gereinigte, trockene Fläche aufsprühen. Auch auf Winkel und Ecken achten. Mit geringem Druck, möglichst nahe an der Oberfläche und weg vom Körper sprühen. Einwirkzeit beachten.

Unsere Empfehlung für die routinemäßige Sprühdesinfektion auf niedrig belasteten Bereichen:
- 1% / 30 min. - 1,5% / 15 min.

Wischdesinfektion: Mit der frisch hergestellten Lösung und sauberen Hilfsmitteln gut feucht wischen und die Einwirkzeit beachten. Zum Wischen von Böden empfehlen wir den Doppelfahreimer Witty-Solo XL. Nach ca. 50 m² Schmutzwasser wechseln.

Unsere Empfehlung für die routinemäßige Wischdesinfektion auf niedrig belasteten Bereichen:

- 0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.

Auf hoch belasteten Bereichen:

- 0,75% / 15 min. - 1% / 5 min.

Desinfektions-Reiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Kühl, verschlossen, originalverpackt und außer Reichweite von Unbefugten.

Verkaufseinheiten

12,5 l Mehrweg-Gebinde
 Art.-Nr. W1293613



Prüfung	Prüfmethode	niedrige Belastung	hohe Belastung
Bakterizidie	EN 1276	0,1% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Levurozidie	EN 1650	0,1% / 5 min.	0,1% / 15 min. - 0,5% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 13697	0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 16615		0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Begrenzt Viruzid	EN 14476	0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,75% / 15 min. - 1% / 5 min.
Polyomavirus	EN 14476	1% / 360 min.	
Murines Norovirus	EN 14476	0,5% / 30 min.	1% / 120 min.
Begrenzt Viruzid	EN 16777	1% / 30 min. - 1,5% / 15 min.	
Polyomavirus	EN 16777	1% / 120 min.	
Murines Norovirus	EN 16777	0,5% / 120 min. - 1% / 60 min.	

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- Sicherheitsdatenblätter
- Betriebsanweisungen
- Bedienungsanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus



Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
 Herrenrothstraße 12 - 16
 D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
 Fax +49 (0) 8292/999-200
 info@witty.de - www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
 Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
 Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
 Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
 Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

